

autotest VIH®, un outil complémentaire au dispositif de dépistage actuel

Dépistage du VIH à partir d'une goutte de sang




- 99.8% des personnes non infectées ont été correctement détectées⁽²⁾
- 100% des personnes infectées ont été correctement détectées⁽²⁾

Simple d'utilisation

Le temps nécessaire pour réaliser l'autotest est d'environ 5 min.

Il se fait à partir d'une goutte de sang obtenue au bout du doigt.

Résultat en 15 minutes

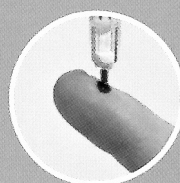

▶ Performances de l'autotest VIH® :

Si la dernière prise de risque/exposition potentielle au VIH est de 3 mois ou plus, les performances de l'autotest VIH® sont les suivantes :

▶ Utilisation :

Pour rappel l'autotest VIH® est fiable pour détecter une infection au VIH datant de 3 mois ou plus. Il se réalise chez soi en toute confidentialité.


En cas de difficultés lors de la manipulation de l'autotest VIH®, l'utilisateur peut appeler le numéro vert de Sida Info Service (0 800 840 800, appel anonyme et gratuit ; 24/24h et 7/7j) ou demander conseil auprès de son pharmacien, ou dans un centre de dépistage (CDAG/CeGIDD)⁽⁵⁾ ou une association de lutte contre le sida. Une vidéo de démonstration est également disponible sur le site de Sida Info Service.

▶ Lecture des résultats :

▶ Il est important de respecter le temps de lecture du test indiqué sur la notice (15-20 minutes) ◀
Avant et au-delà de cette période, le résultat n'est pas fiable


⊕ Le test est négatif si une seule bande est présente (= bande de contrôle)

- En l'absence de comportement à risque dans les 3 derniers mois, cela signifie que la personne n'est pas infectée.
- Attention ! Un test négatif ne signifie pas forcément que le(s) partenaire(s) de la personne testée est (sont) non infecté(s) par le VIH.⁽³⁾

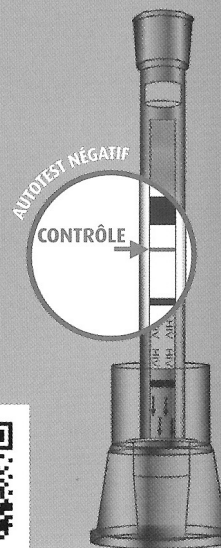

⊕ Le test est positif si deux bandes sont présentes (= bande de contrôle + bande test)

- Cela signifie que la personne est probablement infectée par le VIH.
- La personne doit consulter un médecin ou se rendre dans un CDAG/CeGIDD dès que possible.

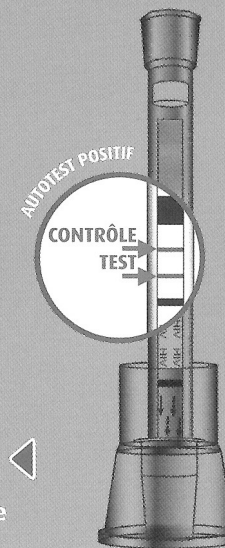

Le résultat doit être confirmé par un test Elisa de 4^{ème} génération réalisé en laboratoire⁽⁵⁾

▶ En attendant le résultat, la personne potentiellement infectée doit éviter toute activité qui pourrait transmettre le VIH à d'autres personnes ◀

Pour toute aide à la réalisation et à l'interprétation du test et pour toutes questions liées au VIH:
Sida Info Service.org
0 800 840 800
Appel confidentiel, anonyme et gratuit



L'autopiqueur n'est pas un déchet comme les autres.



Il doit être rapporté en pharmacie.

Où rapporter votre déchet ?

(1) Virus responsable du sida. (2) Etudes réalisées sur 503 personnes (sensibilité) et 2051 personnes (spécificité) provenant des Etats-Unis et de l'Union Européenne. (3) HAS - Questions générales sur le dépistage du VIH (avril 2015). (4) Rapport 2013 «Prise en charge médicale des personnes vivant avec le VIH» sous la direction du Pr Philippe Morlat http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Morlat_2013_Mise_en_ligne.pdf. (5) CDAG : centre de dépistage anonyme et gratuit / CeGIDD : centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic. autotest VIH® (Réf interne AS-VIH-001) est destiné à l'autodiagnostic du VIH pour un usage privé par des profanes. Cet autotest est fiable pour détecter une infection au VIH datant de plus de 3 mois. Ce dispositif médical de diagnostic in vitro est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice d'utilisation et demander éventuellement conseil à votre pharmacien. En cas de doute sur le résultat obtenu, consulter votre médecin. autotest VIH® est un moyen complémentaire de dépistage du VIH parmi d'autres possibilités existantes. autotest VIH® ne dépiste que l'infection à VIH et pas les autres maladies sexuellement transmises. Fabriqué par AAZ-LMB, Sogaris 217 - 94664 Rungis Cedex. VISA n° 15/07/AZAVIH/GP/001 - Août 2015